

Mascarilla FFP2 NR

Indicada para adultos

Mascarilla filtrante FFP2 no reutilizable (NR). Sin válvula. NO-MEDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.



ESPECIFICACIONES:

- Eficiencia de filtrado: BFE > 95%.
- No estéril.
- No reutilizable (NR).
- Vida útil: 2 años.
- Talla: adultos.
- Tamaño mascarilla abierta: 208 x 150 mm
- Gomas suaves y elásticas para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos.
- Incorpora banda metálica para ajuste nasal.



5 capas de protección



Transpirable

COLORES Y ESTAMPADOS:

- Amarillo
- verde claro
- verde oscuro
- azul oscuro
- Azul claro
- Rosa
- Fucsia
- Burdeos
- Morado
- Lila estampado
- Blanco
- Gris
- Negro
- Cuadros B&N
- Militar
- Constelación

COMPOSICIÓN:

Estructura	Material	Peso
Capa exterior	100% Polipropileno	100 gr/m ²
3 capas filtrantes	Tejido "Melt Blown"	30 gr/m ²
Capa interior	100% Polipropileno	40 gr/m ²

PACKAGING:

- 1 mascarilla por bolsa individual termosellada.
- Cajas: 50 unidades.
- Caja máster: 1000 unidades.
Dimensiones caja máster: 80x40x30 cm.
Peso bruto caja máster: 8 kg.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Este dispositivo es equipo de protección individual según el Reglamento UE / 2016/425.
Evaluación y certificación de los tintes de colores en SGS.



Certificado Europeo CE

Nº de informe: CE-2163-PPE-704
UNE EN-149:2001 + A1:2009

Mascarillas certificadas en Universal, centro autorizado localizado en Turquía. Número de organismo notificado: 2163.



Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.

Dirección: Necip Fazil Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84
Yukarı Dudullu, Ümraniye-Istanbul, Turquía
Teléfono: +90 216 455 80 80
Email: info@universalcert.com
Página web: www.universalcert.com

FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO:



Vista lateral mascarilla gris



Bolsa individual termosellada



Caja de 50 unidades



INSTRUCCIONES DE USO:

1. Lavarse las manos durante 40-60 segundos antes de manipularla.
2. Tocar solo las gomas de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla sobre la nariz y boca.
4. Pasar las gomas elásticas por detrás de las orejas.
5. Pellizcar la banda metálica para ajustarla a la nariz.
6. Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Si ocurre, lavar las manos antes y después.
7. Lavar las manos antes de retirarse la mascarilla.
8. Retirarla tocando solo las gomas elásticas.
9. Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico. Depositarla cerrada en la basura y lavar las manos.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor.