

## Mascarilla FFP2 NR - Talla M

Indicadas para niños/as o personas de entre 1,2 y 1,6 m de altura.

Mascarilla filtrante FFP2 no reutilizable (NR). Sin válvula. NO-MEDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.



### ESPECIFICACIONES:

- Eficiencia de filtrado: BFE > 95%.
- No estéril.
- No reutilizable (NR).
- Vida útil: 2 años.
- Talla M: niños o personas entre 1,2 o 1,6 m
- Tamaño mascarilla abierta: 186 x 135 mm
- Gomas suaves y elásticas para un ajuste cómodo en ambos pabellones auditivos.
- Incorpora banda metálica para ajuste nasal.



5 capas de protección



Transpirable

### COLORES Y ESTAMPADOS:

- Azul claro
- Azul oscuro
- Rosa
- Naranja
- Rojo
- Verde oscuro
- Negro
- Amarillo

### COMPOSICIÓN:

Estructura	Material	Peso
Capa exterior	100% Polipropileno	100 gr/m <sup>2</sup>
3 capas filtrantes	Tejido "Melt Blown"	30 gr/m <sup>2</sup>
Capa interior	100% Polipropileno	40 gr/m <sup>2</sup>

### PACKAGING:

- 1 mascarilla por bolsa individual.
- Cajas: 10 unidades.

### NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Este dispositivo es equipo de protección individual según el Reglamento UE / 2016/425.



**Certificado Europeo CE**

UNE EN-149:2001 + A1:2009

Número de organismo notificado: 2841.

**FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO:**



Vista lateral de la mascarilla



Bolsa individual



Caja de 10 unidades

**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Lavarse las manos durante 40-60 segundos antes de manipularla.
2. Tocar solo las gomas de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla sobre la nariz y boca.
4. Pasar las gomas elásticas por detrás de las orejas.
5. Pellizcar la banda metálica para ajustarla a la nariz.
6. Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Si ocurre, lavar las manos antes y después.
7. Lavar las manos antes de retirarse la mascarilla.
8. Retirarla tocando solo las gomas elásticas.
9. Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico. Depositarla cerrada en la basura y lavar las manos.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor.