

# Mascarilla FFP2 NR - Barça edition

Mascarilla FFP2 oficial del FC Barcelona



## FC BARCELONA

Talla estándar

Mascarilla filtrante FFP2 no reutilizable (NR). Sin válvula. NO-MEDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.



### ESPECIFICACIONES:

- Eficiencia de filtrado: BFE > 95%.
- No estéril.
- No reutilizable (NR).
- Vida útil: 2 años.
- Talla: adultos.
- Tamaño mascarilla abierta: 155 x 105 mm
- Gomas suaves y elásticas para un ajuste cómodo en ambos pabellones auditivos.
- Incorpora banda metálica para ajuste nasal.



5 capas de protección



Transpirable

### COMPOSICIÓN:

- 50% tela no tejida
- 50% tejido filtrante "Melt Blown"

### PACKAGING:

- 1 mascarilla por bolsa individual termosellada.
- Caja display: 50 unidades.
- Caja máster:
  - 20 cajas de 50 unidades
  - Total: 1000 mascarillas

### NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Este dispositivo es equipo de protección individual según el Reglamento UE / 2016/425.  
Evaluación y certificación de los tintes de colores en SGS.

**EN 149:2001 + A1:2009**  
**R 2016/425 Equipos de protección individual**



**Certificado Europeo CE**  
Nº de informe: 1463




**Polski Rejester Statkow S.A.**

Mascarillas certificadas en PRS, centro autorizado localizado en Polonia. Número de organismo notificado: 1463.

Dirección: Al. Gen. Jozefa Hallera 126 80-416 GDANSK, Poland

### DISEÑO DE LA MASCARILLA:

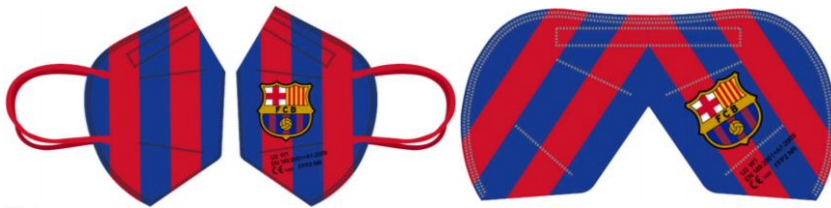

Vista exterior



Vista interior

### PACKAGING:



Bolsa individual termosellada



Caja display de 50 unidades

### Dimensiones packaging:



### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Lavarse las manos durante 40-60 segundos antes de manipularla.
2. Tocar solo las gomas de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla sobre la nariz y boca.
4. Pasar las gomas elásticas por detrás de las orejas.
5. Pellizcar la banda metálica para ajustarla a la nariz.
6. Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Si ocurre, lavar las manos antes y después.
7. Lavar las manos antes de retirarse la mascarilla.
8. Retirarla tocando solo las gomas elásticas.
9. Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico. Depositarla cerrada en la basura y lavar las manos.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor.