

## Mascarilla FFP2 NR - Talla M

Indicadas para niños/as o personas de entre 1,2 y 1,6 m de altura.

Mascarilla filtrante FFP2 no reutilizable (NR). Sin válvula. NO-MEDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.



### ESPECIFICACIONES:

- Eficiencia de filtrado: BFE > 95%.
- No estéril.
- No reutilizable (NR).
- Vida útil: 2 años.
- Talla M: niños o personas entre 1,2 o 1,6 m
- Tamaño mascarilla abierta: 186 x 135 mm
- Gomas suaves y elásticas para un ajuste cómodo en ambos pabellones auditivos.
- Incorpora banda metálica para ajuste nasal.



**5 capas de protección**



**Transpirable**

### COLORES Y ESTAMPADOS:

- Blanco
- Edición Navidad Rojo
- Edición Navidad Verde

### COMPOSICIÓN:

Estructura	Material	Peso
Capa exterior	100% Polipropileno	100 gr/m <sup>2</sup>
3 capas filtrantes	Tejido "Melt Blown"	30 gr/m <sup>2</sup>
Capa interior	100% Polipropileno	40 gr/m <sup>2</sup>

### PACKAGING:

- 1 mascarilla por bolsa individual termosellada.
  - Cajas: 50 unidades.
  - Cajas máster: 1000 unidades
- Dimensiones caja máster: 80x40x30 cm  
Peso bruto caja máster: 8 kg.

### NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Este dispositivo es equipo de protección individual según el Reglamento UE / 2016/425.  
Evaluación y certificación de los tintes de colores en SGS.



#### Certificado Europeo CE

Nº de informe: CE-2163-PPE-704  
UNE EN-149:2001 + A1:2009

Mascarillas certificadas en Universal, centro autorizado localizado en Turquía. Número de organismo notificado: 2163.



#### Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.

Dirección: Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84  
Yukarı Dudullu, Ümraniye-Istanbul, Turquía  
Teléfono: +90 216 455 80 80  
Email: info@universalcert.com  
Página web: www.universalcert.com

**FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO:**



Vista lateral de la mascarilla



Bolsa individual

**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Lavarse las manos durante 40-60 segundos antes de manipularla.
2. Tocar solo las gomas de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla sobre la nariz y boca.
4. Pasar las gomas elásticas por detrás de las orejas.
5. Pellizcar la banda metálica para ajustarla a la nariz.
6. Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Si ocurre, lavar las manos antes y después.
7. Lavar las manos antes de retirarse la mascarilla.
8. Retirarla tocando solo las gomas elásticas.
9. Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico. Depositarla cerrada en la basura y lavar las manos.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor.